



Oxivir® CE Plus Spray

CE
0088

Gebruiksklare Reiniger & Desinfectans voor medische hulpmiddelen en materialen

Omschrijving

Oxivir® CE Plus Spray van Diversey is een reiniger & desinfectans met een breed werkingsspectrum voor Medische Hulpmiddelen en Materialen.

Belangrijke eigenschappen

- Gepatenteerde waterstofperoxide formulering
- Effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen waaronder bacteriën, virussen, schimmels, gisten, sporen
- Korte contacttijden
- Effectieve reiniger
- Geurvrij

Voordelen

- Reinigt en desinfecteert in één stap, reduceert arbeidstijd
 - Uitgebreid getest volgens verschillende Europese normen en effectief tegen meerdere pathogenen, inclusief HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE en het Norovirus
 - Uitstekende reinigende werking, waaronder ook ontkalken en het beperken van kalkopbouw
 - Veilig toepasbaar, geen gevarensymbool op het gebruiksklaar product, niet irriterend voor de luchtwegen
 - Milieuvriendelijk profiel. Actieve stoffen breken af in zuurstof en water
- Het product is niet bestemd voor invasieve medische hulpmiddelen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar

Toepassing:


Schuimreiniging en desinfectie:

1. Verwijder grove vervuiling
2. Breng het schuim aan op het medisch oppervlak
3. Gebruik een schone microvezel- of reinigingsdoek voor het reinigen
4. Neem gewenste inwerktijd in acht (minimaal 30 seconden) en droog na

Opmerking: In geval van Norovirus; reinig het medisch oppervlak voorafgaand aan de desinfectie. Zorg ervoor dat het medisch oppervlak voor 2 minuten vochtig kan blijven.

Belangrijk

Meng niet met andere producten. Gebruik Oxivir® CE Plus Spray niet op oppervlakten die gevoelig zijn voor water of zuur

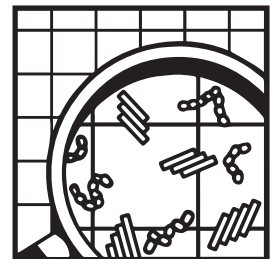



Oxivir[®] CE Plus Spray



Technische gegevens

Uiterlijk:	Heldere kleurloze vloeistof
Relatieve Dichtheid (20°C):	1.00
pH-waarde puur:	< 2

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en verwijderen van dit product worden beschreven op het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). Bewaar in de originele verpakking. Vermijd extreme temperaturen. Reageert op materialen die niet geschikt zijn voor waterstofperoxide.

Product compatibiliteit

Onder de aanbevolen gebruikers instructies, is Diversey's Oxivir[®] CE Plus Spray geschikt voor gebruik op de meest voorkomende materialen.

Milieu-informatie

De gebruikte oppervlakte actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU-verordening reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Microbiologische data

Werkzaamheid is aangetoond door naleving van: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 en EN13727.

Werkingspectrum	Organismen	En-Test	Contacttijd
Virussen	Poliovirus	EN14476	5 minuten
	Adenovirus	EN14476	5 minuten
	Rotavirus	EN14476	5 minuten
	Murine Norovirus	EN14476	2 minuten
Bacteriën	Escherichia coli	EN1276	30 seconden
	Staphylococcus aureus	EN1276	30 seconden
	Pseudomonas aeruginosa	EN1276	30 seconden
	Enterococcus hirae	EN1276	30 seconden